


# ピュアシーネ・ピュアキャスト


メッシュ型で環境にもお肌にも優しい新素材のシーネ・キャスト

## 低温熱可塑性プラスチックを含浸させたメッシュ素材

(生体適合性・吸収性樹脂/ポリカプロラクトン)

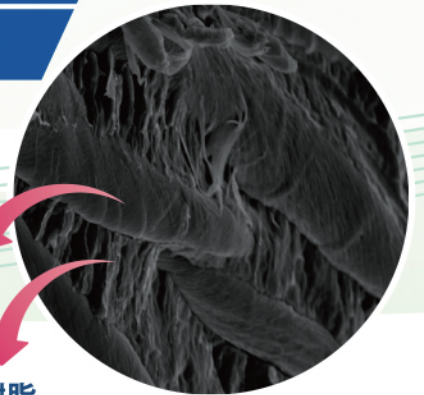

綿  
樹脂

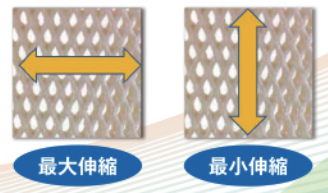


### 特長

- ◆ 70度°Cのお湯で形状付が可能
- ◆ ドライヤー等で形状変更が可能

### 3D-LITE

- ❖ 足首、膝、肘などをしっかり固定  
3mm・5mmの2つの厚さがあります
- ❖ メッシュの大きさを調整することが出来ます

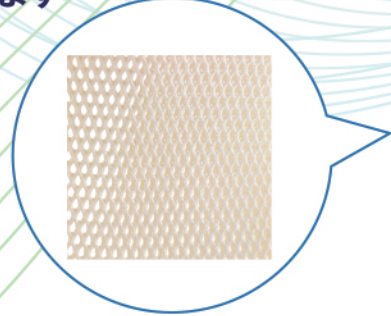

軽量・高耐久

SDGs 素材

お肌に優しい

### X-LITE

- ❖ 指の骨折や小児の骨折に!
- ❖ 多色をご用意しております
- ❖ メッシュの大きさを調整することが出来ます



ピュアキャスト3D-LITE SHEET



無毒で環境にも  
医療スタッフ様にも  
安心・安全



ピュアキャストX-LITE PLUS ロール

特定保健医療材料対象品

# π-LITE®





固定方法動画

# ピュアシーネ・キャストの固定方

## 3D-LITE



① 使用するおおよそのサイズにカット



② 67~70℃のウォーターバスに入れる



③ 柔らかくなったらウォーターバスから引き上げ、形成



④ 装着する部位にはストッキングなどで覆っておく



⑤ 患部に合うように調整していく（再形成可能）



⑥ 必要に応じてマジックテープやエッジングテープも接着し、完成


## X-LITE



① 使用するおおよそのサイズにカット



② 67~70℃のウォーターバスに入れる

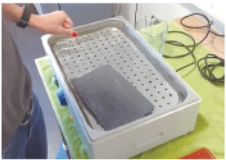

③ 柔らかくなったらウォーターバスから引き上げる



④ 水を切って、熱があるうちに必要なサイズにカット・形成していく



⑤ 患部に合うように調整していく（再形成可能）



⑥ 必要に応じてマジックテープやエッジングテープも接着し、完成

型番	商品名	規格	JANコード	届出番号	JMDNコード
647910000	メッシュ型ピュアシーネX-LITE プラス シート 青	15cm × 10m	04573514492167	13B3X10268000005号	36204000 (成型型副木)
647920000	メッシュ型ピュアシーネX-LITE プラス シート 黒	15cm × 10m	04573514492174	13B3X10268000005号	36204000 (成型型副木)
647930000	メッシュ型ピュアシーネX-LITE プラス シート ホットピンク	15cm × 10m	04573514492181	13B3X10268000005号	36204000 (成型型副木)
648970000	メッシュ型ピュアシーネ3D-LITE シート 3mm	60cm × 90cm	04573514492297	13B3X10268000005号	36204000 (成型型副木)
648990000	メッシュ型ピュアシーネ3D-LITE シート 5mm	60cm × 90cm	04573514492310	13B3X10268000005号	36204000 (成型型副木)
641960000	メッシュ型ピュアシーネX-LITE フック	5cm × 5m	04573514492211	13B3X10268000001号	—
642350000	メッシュ型ピュアシーネX-LITE プラス エッジングテープ 白	2.5cm × 4m	04573514492549	13B3X10268000001号	—


X-LITE プラスエッジングテープ

X-LITE フック

チューブ型包帯

バンテージバサミ

Accessories

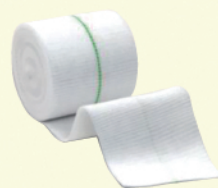

◆問合せ先◆  
グランメイト株式会社

本社 〒260-0007 千葉県千葉市中央区祐光4-2-1  
TEL:043-202-1788 FAX:043-202-1795  
埼玉営業所 〒334-0068 埼玉県川口市新堀町10-31  
TEL:048-280-6616 FAX:048-280-6689

