

X-LITE PLUS / 3D-LITE

— 熱可塑性プラスチック ピュアシーネ —



X-LITE[®] PLUS

[JMDNコード] 36204000 [届出番号] 13B3X10268000005号
(成型型副本)

型番	商品名	JANコード
647910000	X-LITE プラス シート 青	04573514492167
647920000	X-LITE プラス シート 黒	04573514492174
647930000	X-LITE プラス シート ホットピンク	04573514492181
※642350000	X-LITE プラス エッジングテープ 白	04573514492549

※ [JMDNコード] — [届出番号] 13B3X10268000001号



3D-LITE[™]

[JMDNコード] 36204000 [届出番号] 13B3X10268000005号
(成型型副本)

型番	商品名	JANコード
648970000	3D-LITE シート 3mm	04573514492297
648990000	3D-LITE シート 5mm	04573514492310



X-LITEフック



届出番号
[届出番号] 13B3X10268000001号

型番	商品名	JANコード
641960000	X-LITE フック	04573514492211

X-LITE[®] PLUS

3D-LITE[™]

❖ 指の骨折や小児の骨折に！

❖ 多色をご用意しております

❖ メッシュの大きさを調整することが出来ます

❖ 足首、膝、肘などをしっかり固定 3mm・5mmの
2つの厚さがあります

❖ メッシュの大きさを調整することが出来ます

特 長

70度℃のお湯で形状付が可能

ドライヤー等で形状変更が可能

軽量・高耐久

SDGs 素材

お肌に優しい



無毒で環境にも医療スタッフ様にも安心・安全



固定方法動画

固 定 方 法

X-LITE PLUS



① 使用するおおよそのサイズにカット



② 67~70℃のウォーターバスに入れる



③ 柔らかくなったらウォーターバスから引き上げる



④ 水を切って、熱があるうちに必要なサイズにカット・形成していく



⑤ 患部に合うように調整していく（再形成可能）



⑥ 必要に応じてマジックテープやエッジングテープも接着し、完成

3D-LITE



① 使用するおおよそのサイズにカット



② 67~70℃のウォーターバスに入れる



③ 柔らかくなったらウォーターバスから引き上げ、形成



④ 装着する部位にはストッキングなどで覆っておく



⑤ 患部に合うように調整していく（再形成可能）



⑥ 必要に応じてマジックテープやエッジングテープも接着し、完成



【問合せ先】

グランメイト株式会社

本 社 〒260-0007 千葉県千葉市中央区祐光4丁目2番1号
TEL 043-202-1788 FAX 043-202-1791

埼玉営業所 〒334-0068 埼玉県 川口市 新堀町 10-31
TEL 048-280-6616 FAX 048-280-6689