

Probe Shield

プローブシールド

らくらくプローブカバー



プローブカバー内への
ゼリー挿入が不要



専用テープでしっかり固定が可能

プローブシールド 4つのポイント

カバー内へのジェル挿入が不要

セッティングが簡単・スピーディ

カバーの密着性が高い為、画質が安定

伸縮素材を使用の為、破れにくい



プローブシールド同梱内容

付属の専用テープかゴムで
カバーを固定

**カバー内への
ジェル挿入が不要に!**

エア抜きも不要で、処理後の
洗浄の手間も省けます

従来
製品



1



超音波プローブシールドを滅菌パックから取り出します。カバーの折りたたまれた部分を広げ、黄色いタブと長方形の白い粘着テープの台紙の部分が上になるようにします。

2



黄色のタブの部分が上になっていることを確認しながら、その状態で、白く細いタブに沿ってプローブシールドの中に手を挿入します。

3



プローブシールド内に挿入した手とは反対の手で白く長方形の形をした粘着テープの台紙の部分をはがし、粘着テープの粘着部分を露出します。

4



プローブの先端部分を露出された粘着テープの粘着部分に押し付け、貼り付けてください。
カバーのしわをつくらないように、カバーに挿入されている手でプローブが密着している粘着部分がフラットになるように調整してください。

5



カバーの内側からしっかりとプローブをつかみます。
白地に赤い矢印が表示されているタブの部分を引っ張り、カバーをプローブのヘッドからケーブルのほうへと引き上げます。

6



プローブの内側から手を抜き、白い固定用粘着テープを取り出します。
白い固定用粘着テープの白いストラップを取り除き、プローブカバーの周りに巻き付けて固定します。

ORDERING INFORMATION

販売名：プローブシールド

届出No.

14B3X10015000012

カタログ No.	包装単位	規格	JAN
PS-30	30 枚/箱	15×30cm	(01) 04562317620112
PS-120	30 枚/箱	15×120cm	(01) 04562317620129
PS220	25 枚/箱	15×220cm	(01) 04562317620136

代理店

販売元



グランメイト株式会社

製造販売元 株式会社シルクス

一般医療機器 体表面用超音波プローブカバー
医療機器届出番号：14B3X10015000012

本 社 〒260-0007 千葉県千葉市中央区祐光4-2-1
TEL:043-202-1788 FAX:043-202-1795
埼玉営業所 〒334-0068 埼玉県川口市新堀町10-31
TEL:048-280-6616 FAX:048-280-6689

〒963-0533 福島県郡山市日和田町八丁目竹ノ作20-9